

Google Pixel7においてスイッチャクセスを設定する手順を記載します。


他の端末でも同じ操作になるとは限りません。

それぞれの端末において操作が違うことがありますので、各自ご確認ください。

*注)スイッチャクセスをインストールする必要がある場合、インストールは各自の責任において行ってください。

*注)各端末におけるいかなる不具合も、国立障害者リハビリテーションセンターは責任を負いません。

アクセシビリティ機能を使用する際の構成図です。

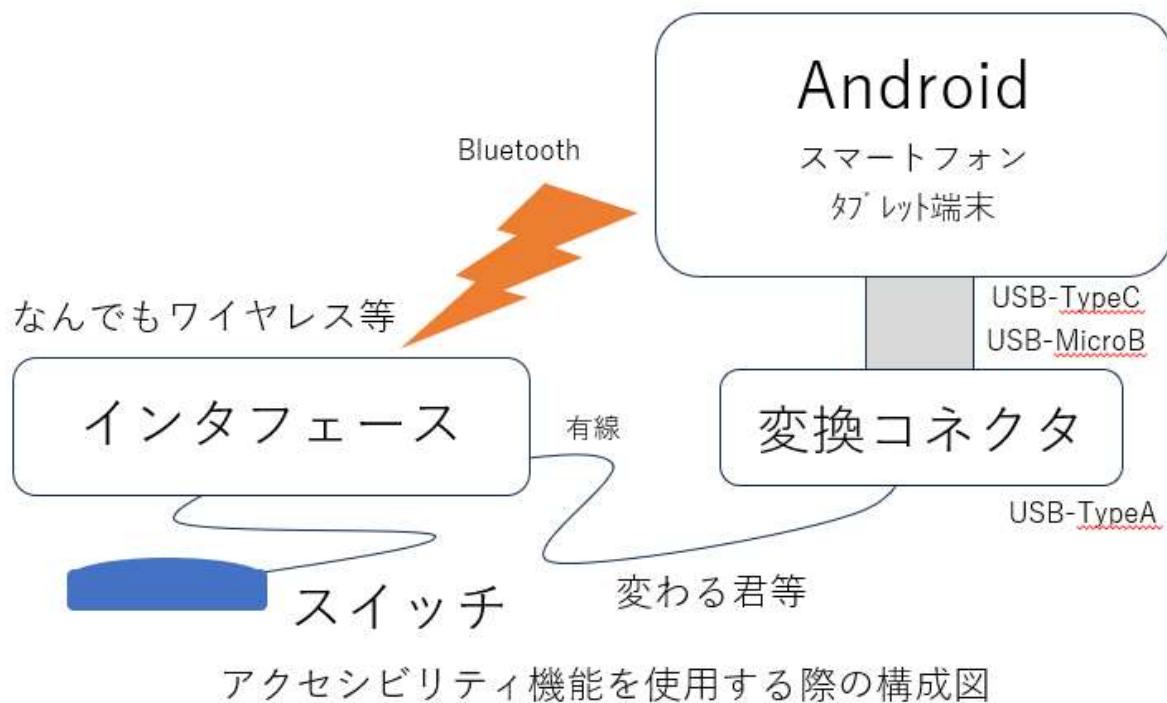

スイッチ → なんでもワイヤレス(Bluetooth)や変わる君(有線)等のインターフェース → 変換アダプタ → スマートフォンやタブレット端末 の様に接続します。

スイッチを押すと、操作を行いたい箇所を選択するモードに入れます。選択した箇所において、いくつかの操作が表示されるので、それらを選択するとスマートフォンやタブレット端末が操作できます。

操作例(アプリの起動)


- ・操作したいアプリのアイコンを選択する
- ・タップ操作することで、そのアプリが起動する

操作例(文字を入力する)…自動選択をオフにした場合

- ・フリック入力キーボード画面で、入力したい文字の子音(例えば「か」行)を選択する
- ・ここで表示される「左フリック」を選択すると、「き」が入力できる。フリック入力では、「か」を選択した後の「か」「き」「く」「け」「こ」の文字表示のうち、左フリックは「き」となります。
- ・自動選択をオンにするのであれば、QWERTY キーボードや50音かなキーボードにする必要があります。

初期画面から、

「設定」アイコンをタップ

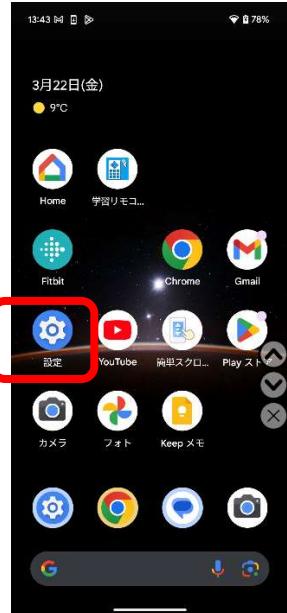


初期画面／設定

「ユーザー補助」をタップ



設定／ユーザー補助

「スイッチアクセス」をタップ

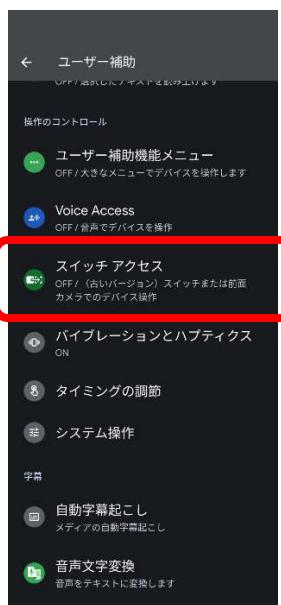


設定／ユーザー補助／スイッチアクセス

「設定」をタップ



設定／ユーザー補助／スイッチアクセス／設定

設定／ユーザー補助／スイッチアクセス／設定とタップしていくと
スイッチアクセスの設定画面になり、

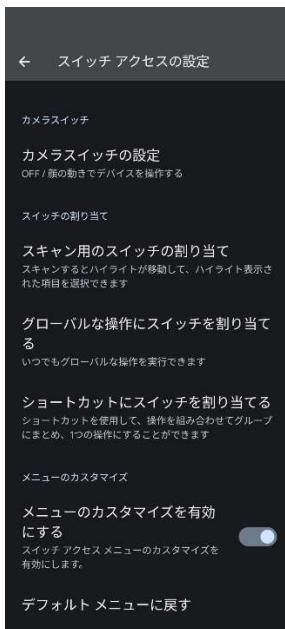

- 1)スイッチの割り当て
 - ・1-1)スキャン用のスイッチの割り当て
- 2)スキャンのカスタマイズ
 - ・2-1)自動スキャン
 - ・2-2)ポイントスキャン
 - ・2-3)スキャンを自動的に開始
 - ・2-4)自動選択
- 3)ディスプレイと音
 - ・3-1)スキャン時のハイライト表示
 - ・3-1)読み上げ、音、バイブレーション


等が設定できます

スイッチアクセスの設定

1)スイッチの割り当て

- ・1-1)スキャン用のスイッチの割り当て

「スキャン用のスイッチの割り当て」をタップ

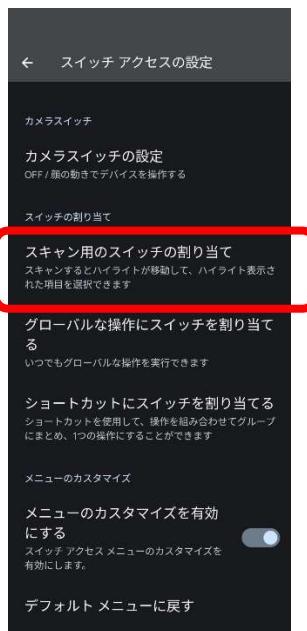

設定／ユーザー補助／スイッチアクセス／設定／スキャン用のスイッチの割り当て

「選択」をタップ




設定／ユーザー補助／スイッチアクセス／設定／スキャン用のスイッチの割り当て／選択

Space に割り当てたスイッチとは別のスイッチを割り当てたい場合、
一旦、「物理スイッチを削除」をタップします
(写真では、Space キーが割り当てられています)




設定／ユーザー補助／スイッチアクセス／スキャン用のスイッチの割り当て／選択


「物理スイッチを削除」をタップした場合は、「スイッチを削除」をタップ

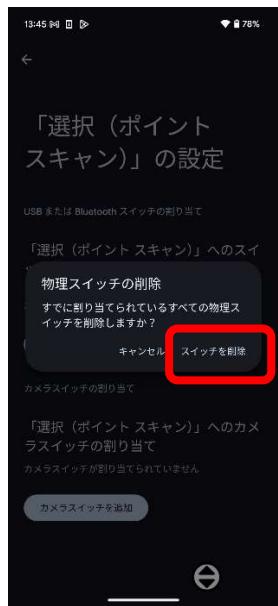

何も設定されていない状態で Enter キーに該当するスイッチや別のスイッチを押すと、
そのスイッチが「選択」の操作に割り当てられます。
操作したいスイッチと接続しているキーボードインターフェースに合わせて設定してください。

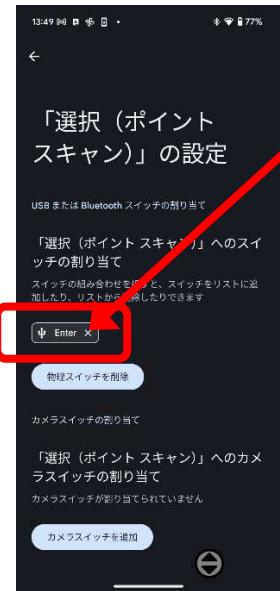

スイッチインターフェース
(なんでもワイヤレス、Blue2、変わる君など)
Enter Space

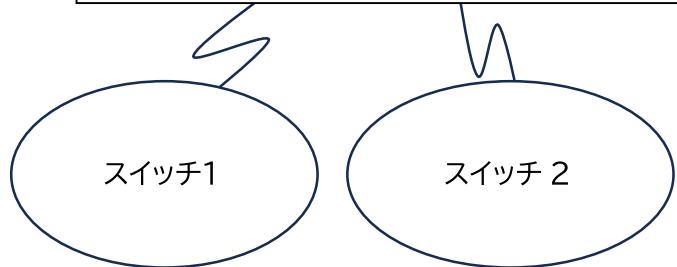

ここでは
スイッチ1は Enter に、
スイッチ2は Space に割り当てられています

設定／ユーザー補助／スイッチアクセス／
スキャン用のスイッチの割り当て／選択


スイッチアクセスの設定

2)スキャンのカスタマイズ

・2-1)自動スキャン


・2-2)ポイントスキャン

設定／ユーザー補助／スイッチアクセス／設定／自動スキャン(ポイントスキャン) をタップ

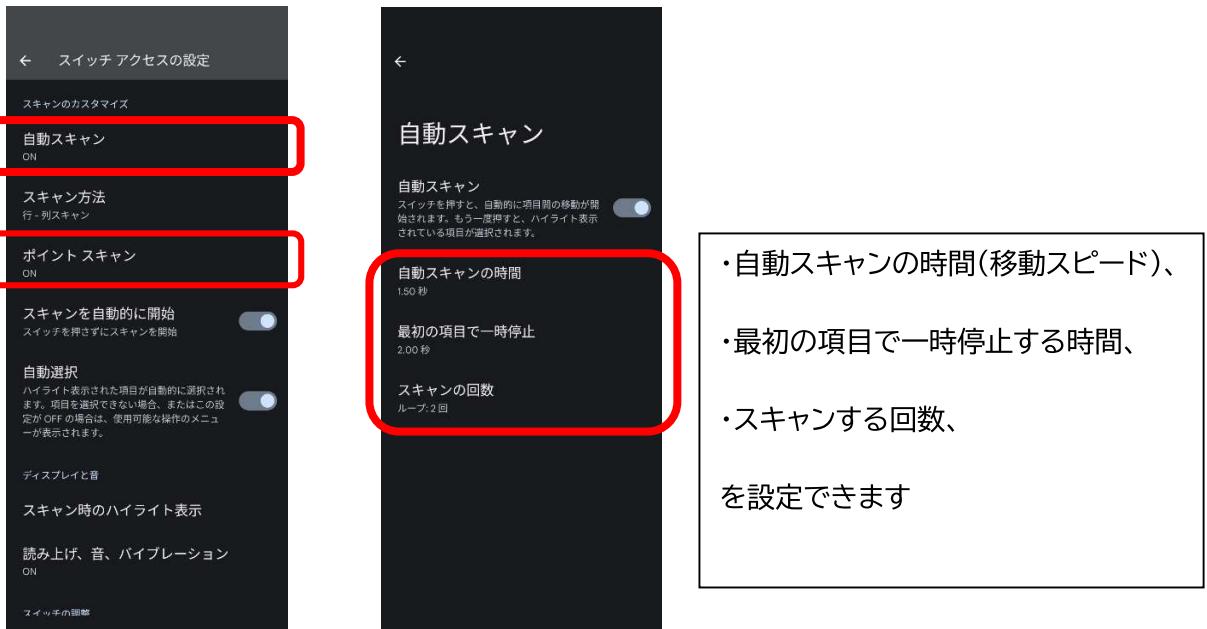

設定／ユーザー補助／スイッチアクセス／設定／自動スキャン(ポイントスキャン)


ポイントスキャンでも同様の設定を行うことができます。

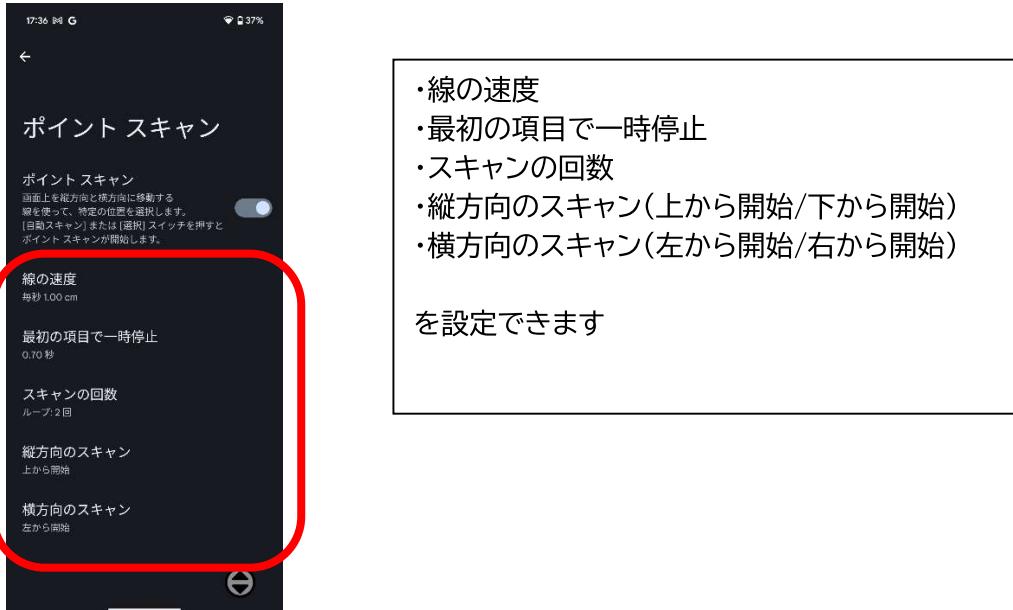

設定／ユーザー補助／スイッチアクセス／設定／ポイントスキャン

その他、

- ・2-3)スキャンを自動的に開始
- ・2-4)自動選択

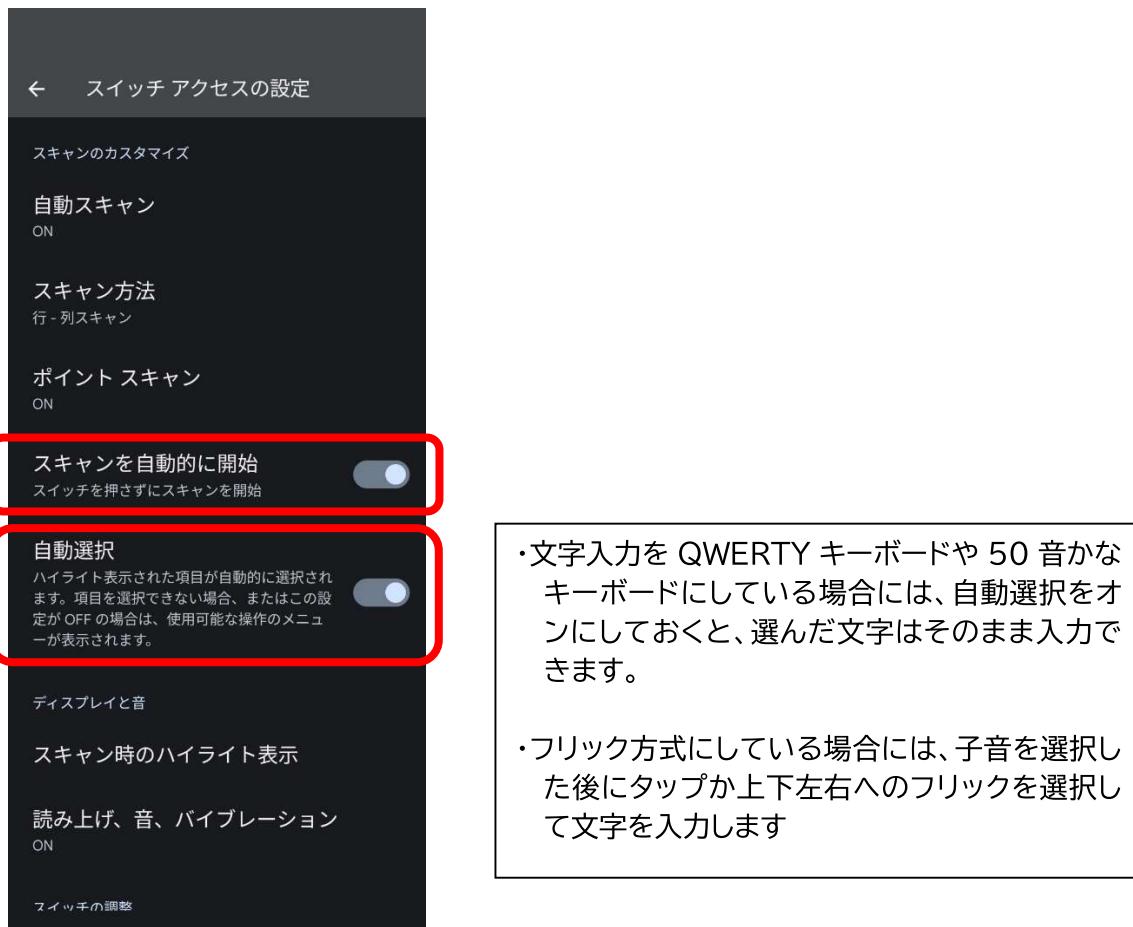

設定／ユーザー補助／スイッチアクセス／設定／スキャンを自動的に開始

設定／ユーザー補助／スイッチアクセス／設定／自動選択

を設定できます。

スイッチアクセスの設定

3)ディスプレイと音


・3-1)スキャン時のハイライト表示

ハイライト表示の色、ハイライト表示する線のスタイル(実線の太さ)を変更できます



設定／ユーザー補助／スイッチアクセス／設定／スキャン時のハイライト表示

・3-2)読み上げ、音、バイブレーション

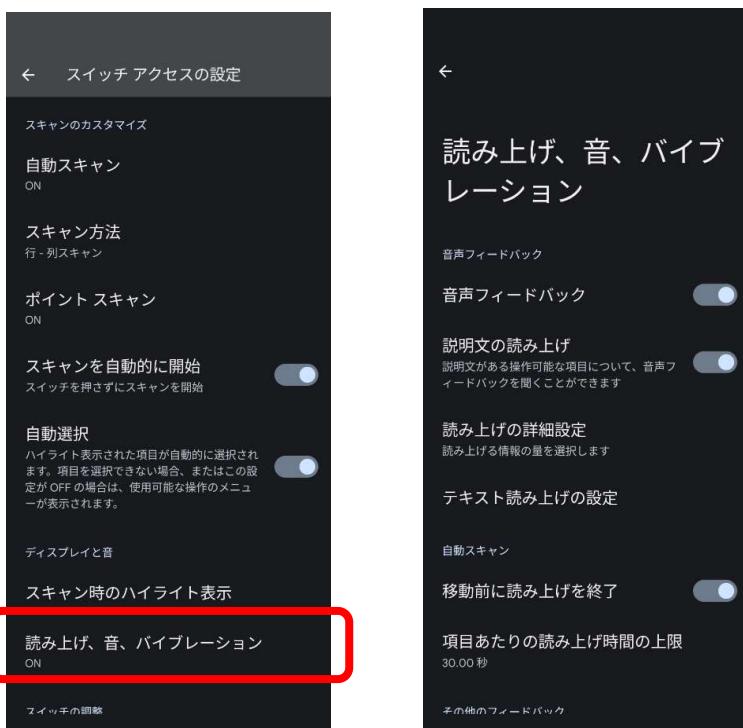

設定／ユーザー補助／スイッチアクセス／設定／読み上げ、音、バイブレーション等が設定できます。